

## Ciorapi Medicinali Oedema TWIN 25 microfibra 3/4 varf inchis (soseta+soseta) compresia 3 varf inchis



Ciorapi Medicinali Oedema TWIN 25 microfibra 3/4 (soseta+soseta) compresia 3 (20-36mmHg) pentru femei si barbati-varf inchis Produs FRANTA Setul Oedema Twin 25 microfibra este indicat pacientilor cu varice pentru o compresie reglabila in functie de necesitati. Indicat pacientilor cu oedem permanent si celor care au suferit o interventie chirurgicala venoasa sau o scleroterapie!

Rating: Nu a fost evaluat încă?

**Pret:**

Modificator de variante de pre?:

63,03 lei

Prețul de vanzare cu reducere:

75,00 lei

Reducere:

TVA: 11,97 lei

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Descriere

***Ciorapi Medicinali compresivi Oedema TWIN 25 microfibra - varf inchis - (soseta+soseta) compresia 3 ( 20-36 mmHg) pentru femei si barbati.***

Setul Oedema TWIN 25 microfibra este indicat pacientilor cu varice , pentru o compresie reglabila in functie de necesitati !

***Indicatii :***

° varice, umflături, după chirurgie flebologică și scleroterapie,

° pigmentare, eczem? venoas?, ulcer cicatrizat,

° tromboz? venoas? profund?, edem permanent,

° tulbur?ri venoase severe în sarcin?,

° insuficienta limfatica moderata sau severa , tratament pentru TVS ?i TVP,

° preven?ie ?i tratament al sindromului post- trombotic moderat sau sever.

***Urmati indicatiile medicului dumneavoastra :***

***Oedema TWIN 25 este disponibil in varianta :***

a) soseta +soseta microfibra cu varf inchis

negru , sable .

**Culori :**





S/N S/L M/N M/L L/N L/L

**Masuri :**



**Descriere :**

Gama Oedema TWIN dezvoltata de laboratoarele KREUSSLER PHARMA este unica si

originala la ora actuala . Ea permite tratarea patologiilor venoase reglarea unei strangeri si

compresii elastice superioare clasei de compresie 2

***Setul Oedema TWIN 25 este disponibil in varianta :***

a) **O soseta de compresie elastica clasa 1(10-15 mmHg ) + o soseta de compresie clasa 2**

**(15 -20 mmHg)**

Soseta de contentie elastica care se aplica direct pe pielea piciorului este tratata in partea

exterioara cu silicon pentru a facilita ca al doilea ciorap care se suprapune primului ,sa alunece

usor peste soseta .

Beneficiile suprapunerii celor 2 perechi de ciorapi de compresie duce la o compresie

cumulativa , in functie de necesitatile si indicatiile medicale particulare fiecarui pacient ,

ajungandu-se la o compresie 3 / 3+ / 4 /

**AVANTAJUL.....ESTE CA** montarea ciorapului medicinal devine usoara cu Oedema TWIN. Cu

cat forta de compresie a unui ciorap este mai ridicata, cu atat este mai greu si de pus pe picior.

Astfel, suprapunand doua perechi de ciorapi cu o compresie diferita, obtinem exact compresia

puternica de care avem nevoie, dar ne va fi extrem de usor sa il incaltam.

incaltarea de dimineata , cu ansamblul de soseta + soseta , ciorap cu banda sau

***Important :***

dres de compresie impune o grija speciala ,evitand sa se traga prea tare si sa se aseze cu pliuri

Toata gama Oedema se intretine foarte usor, ciorapii putand fi spalati la masina

***Intretinere :***

de spalat pe un program scurt la maxim 40 de grade.



**Atentie:** ciorapii nu trebuie supusi unui program de uscare sau in apropiere de o sursa de

caldura.

Imediat dupa spalare, acestia trebuie uscati in conditii naturale.

**in functie de dimensiunile piciorului Dumneavoastra:**

**Alegeti marimea**

a. Aflati lungimea piciorului Dumneavoastra .

Alegeti varianta de ciorap NORMAL daca lungimea este mai mica de 39 cm / LONG daca

lungimea este mai mare sau egala cu 39 de cm

Masura ciorapului de contentie de dedesubt este adaptata la referinta indicata de masuratoare.

b. Masurati circumferinta gleznei (b);

c. Masurati circumferinta gambei (c);

|     |                  | (b) CIRCUMFERINTA GLEZNEI      |                                 |               |                                |               |  |
|-----|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--|
|     |                  | 18 à<br>20 cm                  | 20 à<br>21 cm                   | 21 à<br>23 cm | 23 à<br>24 cm                  | 24 à<br>27 cm |  |
| (c) | < 36 cm          | SMALL<br>(a) Normal<br>ou Long |                                 |               |                                |               |  |
|     | de 36<br>à 39 cm |                                | MEDIUM<br>(a) Normal<br>ou Long |               |                                |               |  |
|     | > 39 cm          |                                |                                 |               | LARGE<br>(a) Normal<br>ou Long |               |  |

CIRCUMFERINTA GAMBEI

**Comanda acum la tel.0722 469 712 sau 021 230 17 55**

**Livrare in toata tara.**

