

Pansament tubular EPITACT DIGITUBES® EPITHELIUM 26® - FRANTA



PANSAMENTUL " DIGITUBES® " este o protectie brevetata, foarte fina, realizata din Epitelium 26R Rezultatul:este ca formarea bataturilor (ingrosarilor pielii) sau bataturilor dintre degete este limitata , aparitia basicilor este evitata si durerea suprimata .El raspandeste presiunea si inhiba frecarea exersata asupra degetului dumneavoastra. . SE SPALA SI SE REUTILIZEAZA

Rating: Nu a fost evaluat încă?

Pret:

Modificator de variante de pre?:

46,22 lei

Pre?ul de vanzare cu reducere:

55,00 lei

Reducere:

TVA: 8,78 lei

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Descriere

PANSAMENTUL " DIGITUBES® " este o protectie brevetata, foarte fina, realizata din Epithelium 26R in forma tubulara

El raspandeste presiunea si inhiba frecarea exersata asupra degetului dumneavoastra .Rezultatul este ca formarea bataturilor (ingrosarilor pielii) sau bataturilor dintre degete este limitata, aparitia basicilor este evitata si durerea suprimata .

Un deget dureros ? O batatura sau o ingrosare intre degetele piciorului ?

*Folositi **Digitubes® EPITACT®** care datorita gelului **Epithelium 26®** din care e format evita batatura si durerile legate de frecarea excesiva a degetului.*

Digitubes® este atat de fin incat poate fi purtat in pantofi escarpin. Marele avantaj in afara de finete, este ca poate fi spalat si reutilizat. Este o solutie discreta, eficace si economica. Intoarceti Digitub pe fata obtinand un manson si sa il puneti pe deget positionand gelul de Epithelium TM in contact cu zona pe care doriti sa o protejati.

° **1 cm de Epithelium 26® este suficient sa vindece presiunile si sa previna formarea bataturilor pe degete si dintre degetele piciorului**

- ° **Elasticitatea si finetea tesaturii contribuie la confortul dispozitivului.**
- ° *Amprenta mica permite instalarea pe degetele vecine fara sa jeneze*
- ° *Digitubes® este lavabil cu apa si sapun.*
- ° *Cu 1.5 cm de Digitube®, protejati batatura dv 10 zile in medie.*

PREZENTARE

° **Vandut la cutie cu 1 folie de 10 cm pansament / care se taie in functie de necesitatile pacientului.**

° **Vandut la cutie cu 3 folii de cate 10 cm**

SFATURI DE UTILIZARE :

Decupati un Digitube® cu o foarfeca buna la lungimea dorita

Indepartati pelicula de protectie descoperind gelul.

Intoarceti Digitubes pe fata obtinand un manson pe care sa il puneti pe deget positionand gelul de Epithelium TM in contact cu zona ce doriti sa o protejati.

PRET

° Vandut 1 folie de 10 cm lungime Pret 55 ron cutia mica
° Vandut 3 folii de 10 cm lungime Pret 108 ron cutia mare

MARIMI: Diametrul

? 22 mm. MASURA S

? 25 mm. MASURA M

? 33 mm. MASURA L

INTRETINERE :

Se spala si se reutilizeaza .

Sa fie spalat de mana fara sa fie frecat.

Se usuca natural , nu se calca si se reutilizeaza.

COMPOZITIA:

Gel de silicon . tesatura poliamida elastine.

CONTRA INDICATII:

Produsul a fost testat cu toate testele impuse de norma ISO 10993-1. Daca in ciuda acestora se observa o reactie alergica oprite imediat utilizarea .

Nu aplicati pe o rana neprotejata .

In cazul persoanelor suferind de arterita, diabet, polynevrita a membrelor

*inferioare sau ulcer varicos / nu utilizati niciodata produsul pe o plaga ,
supravegheati piciorul in timpul utilizarii si in caz de dubiu, cereti sfatul medicului
sau podologului.*

*Responsabilitatea Societatii Millet Innovation nu poate sa fie angajata in caz de
utilizare neconforma sfaturilor fabricantului*



Toe	a	b	c
Women	S	S	M
Men	S	M	L

Comanda acum la tel.0722 469 712

Livrare in toata tara.

&