

Orteza CORECTIVA DE ZI pentru mont (Hallux Valgus) EPITACT FRANTA



ALEGETI MARIMEA DIVER: Dacă ezitați între 2 măsuri,
alegeți măsura mai mică!

S	20 ≤ Ø ≤ 21,5 cm
M	21,5 ≤ Ø ≤ 23 cm
L	23 ≤ Ø ≤ 24,5 cm

Orteza corectiva de zi pentru mont de la Epitact Franta . DE MARE CALITATE corecteaza si opreste evolutia montului.INDICATII : Purtarea zilnica a Ortezei corective EPITACT corecteaza si opreste evolutia hallux valgus(montul piciorului)tratand si durerea .Este recomandata in cazul in care degetul mare pastreaza mobilitatea catre lateral.

Rating: Nu a fost evaluat încă?

Pret:

Modificator de variante de pre?:

155,00 lei

Pre?ul de vanzare cu reducere:

155,00 lei

Pre?ul de vânzare f?r? taxe: 155,00 lei

Reducere:

TVA:

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Descriere

Orteza corectiva de zi pentru montul piciorului (hallux valgus) de la Epitact , Franta

Este de dorit sa incercati aceasta modalitate de corectie cu blandete , care protejeaza piciorul , si inlatura durerea inainte de a actiona cu metode radicale .

Indicatii : Purtarea zilnica a Ortezei corective EPITACT poate corecta si opri evolutia hallux valgus(montul piciorului) tratand si durerea .

Functionalitate :

Datorita conceptiei sale brevetate ,ce prezinta tehnologia EPITHELIUM TMFLEX ,orteza corectoare , moale si ultra fina , se adapteaza usor in toti pantofii. Diferita de ortezele rigide,ea actioneaza in timpul mersului asupra tuturor factorilor care agraveaza deformarea.

Prezentare 1 unitate /cutie.

Durata de viata :

Daca este intretinuta corect, poate zi purtata zilnic mai multe luni.

CUM SE FORMEAZA HALLUX VALGUS? (SCHEMA 1)

Hallux valgus (MONTUL) este o deformare a piciorului data de deviatia primului metatarsian si a degetului gros, antrenand formarea unei protuberante osoase : montul. Din nefericire aceasta deformare inestetica se agraveaza cu varsta aducand foarte des dureri insuportabile.

CUM FUNCTIONEAZA ORTEZA CORECTIVA EPITACT (SCHEMA 2)

Tendonul extern brevetat in silicon de EPITHELIUM TM FLEX permite redresarea degetului gros. Corectia este reglabila exersand o tensiune mai mare sau mai mica asupra tendonului; Tendonul extern EPITHELIUM TMFlex permite deasemeni sa se opreasca presiunea asupra montului si sa vindece durerea; Degetul in Epithelium creaza o frana confortabila de contra-apasare cu pantoful si permite sa impinga primul metatarsian; Mansonul metatarsian de compresiune, extra fin, permite sa se limiteze calcarea si largirea partii din fata a piciorului.



Contraindicatii :

Orteza nu trebuie sa fie utilizata in cazul in care degetul gros nu mai este mobil in partea

laterala.

Rezistentă produsului:

Produsul poate fi utilizat câteva luni; Spalare : la masina la 40° in saculetul de spalare prevazut in pachet si comercializat odata cu orteza.

Stabilirea masurii :

ALEGETI MARIMEA DVS! Dica esentiala intre 2 masuri, alegeti cea mai mica!	
S	20 ≤ Ø ≤ 21,5 cm
M	21,5 ≤ Ø ≤ 23 cm
L	23 ≤ Ø ≤ 24,5 cm

Comanda acum la tel.0722 469 712 sau 021 230 17 55